

TESTE RÁPIDO DPP HIV - Coleta de fluido oral

1 CUIDADOS ANTES DO TESTE

O kit diagnóstico.



Você vai precisar de cronômetro ou relógio.



Confira o prazo de validade do kit.



Escreva no suporte e no frasco de eluição o nome da pessoa a ser testada.



2 COLETA

Antes da coleta, certifique-se de que a pessoa não comeu, fumou, bebeu, escovou os dentes ou praticou atividade oral que deixou resíduo 5 minutos antes do teste. Neste caso, oriente a lavar a boca com água e aguarde esse tempo. Se a pessoa estiver de batom, deverá retirá-lo.


Oriente a pessoa para inserir o coletor acima dos dentes e contra as gengivas.



Com ligeira fricção, passar o coletor gentilmente 4 vezes até o final da gengiva.



4 vezes também na gengiva inferior. No espaço entre o final da gengiva e o começo da bochecha.

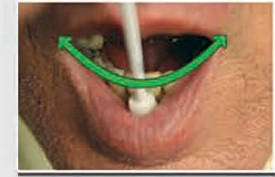

3 TESTE

Insira o coletor no frasco identificado e quebre a haste.



Feche a tampa e agite suavemente por 10 segundos.



Retire a tampa do dosador e coloque 2 gotas no poço 1.



5 minutos depois, coloque 4 gotas do tampão no poço 2.



4 LEITURA E INTERPRETAÇÃO

Depois de, no mínimo 10 e no máximo 25 minutos da adição do tampão, ler o resultado.

NÃO REAGENTE



Linha rosa na área de Controle

REAGENTE



Linha rosa na área de Controle e na área de Teste.

TESTE NÃO VÁLIDO



Linha rosa não aparece na área de Controle. REPITA O TESTE